

Wyrób medyczny

Jasnum comfort

10
GLOBULEK
DOPOCHWOWYCH

Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta dotyczące zastosowania wyrobu. Instrukcję używania należy zachować, aby w razie konieczności móc ponownie ją przeczytać.

Jasnum comfort, globulki dopochwowe – komfort i ochrona

Globulki dopochwowe **Jasnum comfort** tworzą na powierzchni błon śluzowych barierę ochronną, która nawilża i chroni błony śluzowe pochwy przed uszkodzeniami nabłonka spowodowanymi suchością pochwy, podczas stosunków, badań ginekologicznych czy aktywności ruchowych. Stosowanie wyrobu medycznego poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej w pochwie oraz redukuje nieprzyjemny zapach.

SKŁAD

1 globulka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

INFORMACJE OGÓLNE I WSKAZANIA

Wyrób medyczny **Jasnum comfort** jest przeznaczony dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy związanych z:

- atrofią błon śluzowych pochwy;
- niedoborem estrogenów;
- dyspareunią (bolesnością stosunków);
- długotrwałym stresem;

W celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:

- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy;
- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych;
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii;
- po zabiegach laserowych;
- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych;
- w okresie okołomenopauzalnym;
- po porodzie.

Wyrób zaleca się również w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy (wywołanym np. przez podróże, basen, saunę, fitness, antybiotykoterapię), poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego pH pochwy.

Stosowanie wyrobu redukuje nieprzyjemny zapach z pochwy.

Produkt niehormonalny.

Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów, w tym: SLS, SLES.

MECHANIZM DZIAŁANIA WYROBU

Po aplikacji wyrobu **Jasnum comfort** dopochwowo, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Zawartość w wyrobie soli sodowej kwasu hialuronowego oraz octanu tokoferylu (witaminy E) zabezpiecza i nawilża błonę śluzową. Kwas mlekowy sprzyja utrzymaniu właściwego pH pochwy na poziomie <4,5 (odczyn kwaśny).



USP Zdrowie

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

WYRÓB MEDYCZNY

czcionka	wersja	data
≥ 1,2 mm	JasnCom_label_v7	2022_03_17

Wyrób medyczny

Jasnum comfort

10
GLOBULEK
DOPOCHWOWYCH

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga:

1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistra wyjąć 1 globulek poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do momentu stwardnienia globulki.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej. **Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!**

OSTRZEŻENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- Nie odbywać stosunków piciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.
- W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.
- Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.
- Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.
- Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i źródłami ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Dostępne opakowania wyrobu:

2 blistry po 5 globulek (10 globulek).

Masa jednej globulki ok. 1,6 g



Produkt jednorazowego użytku/
Nie używać powtórnie



Informacja na blistrze oraz na kartoniku



WYTWÓRCA
LABORATOIRE L'IDEAL Parisien Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 8,
32-064 Niegoszowice
tel./fax +48 12/ 283 88 60
www.lideal.pl

Data opracowania instrukcji używania:
Wydanie 08 z dnia 15.02.2022